

B. Braun Space




Pousse-seringue Perfusor® Space



Ce document n'est pas la notice d'utilisation, mais une aide à l'utilisation simplifiée. Avant la mise en service du Perfusor® Space, toute personne utilisant cet appareil doit consulter la notice d'utilisation Perfusor® Space et accessoires.

1 – Allumer l'appareil :

- Sélectionner 
- Allumage de l'appareil et vérification interne du système suivis de l'ouverture automatique du bras mécanisé




2 – Insérer la seringue :



Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite, ouvrir la façade et insérer la seringue










Refermer le verrou de seringue en maintenant la seringue de la main gauche (les ailettes doivent être positionnées à la verticale dans la fente située à gauche de la butée verte) puis refermer la façade

- Le pousse-seringue reconnaît le modèle de seringue inséré*. Confirmer avec la touche 
- Le bras du pousse-seringue se referme automatiquement

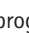

* Si ce n'est pas le bon modèle de seringue, assurez-vous que la seringue est bien insérée et utilisez les flèches hautes et basses pour sélectionner le modèle présent dans la liste affichée à l'écran

3 – Programmer un débit et démarrer la perfusion :

- Le débit est affiché à l'écran, dans le menu principal
- Sélectionner  pour programmer un débit
- Sélectionner  et  pour le réglage des valeurs puis  et  pour passer d'un digit à l'autre
- Démarrer la perfusion avec  ou effacer la valeur de débit avec 





4 – Délivrer un bolus :

- Sélectionner  sur le clavier
- Maintenir  pour délivrer un bolus manuel (Voir menu Option pour modifier le débit bolus si nécessaire)




5 – Remplacer la seringue :


- Sélectionner la touche  pour arrêter la perfusion
- Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite
- Confirmer le message à l'écran avec la touche  Ouverture automatique du bras
- Ouvrir la façade et remplacer la seringue



6 – Eteindre l'appareil :

- Après avoir retiré la seringue (Voir point 5), refermer le verrou puis la façade
- Maintenir  pendant 3 secondes

Seringue en place = mode stand-by
Seringue retirée = extinction de l'appareil

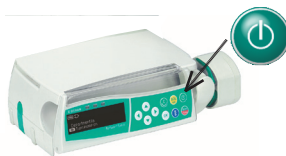

Distribué par :

B. Braun Medical SAS | 204, avenue du Maréchal Juin - BP 331 | F-92107 Boulogne Cedex

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Capital de 31 000 000 € | RCS NANTERRE 562 050 856