Perfusor® Space

Mini-guide

Mise en service et début de perfusion

- Appuyez sur (1), pour mettre l'appareil en marche.
 Ouvrez l'étrier de seringue et le volet de pompe et placez la seringue.
- 2. Fermez l'étrier de seringue ainsi que le volet et confirmez le type de seringue avec () Etablissez la liaison au patient.
- 3. Si nécessaire, sélectionnez la base de données méd. avec ou sélectionnez/saisissez directement les paramètres thérapeutiques avec temperature et démarrez avec ...

Modifier le débit

1. Appuyez sur ♠, entrez le nouveau débit avec ❖ et confirmez-le avec ⓒ pour continuer avec le nouveau débit.

Changement de seringue et nouveau démarrage de la thérapie

1. Appuyez sur ep pour arrêter la perfusion et interrompez la liaison au patient.

- 2. Ouvrez l'étrier de seringue. (Si l'étrier de seringue est tiré après plus de 30 s, il faut confirmer le changement de seringue avec ♠).
- 3. Placez une nouvelle seringue. Fermez l'étrier ainsi que le volet et confirmez la seringue avec (or).
- 4. Purgez si nécessaire avec ⊕ et ♠. Pour continuer, appuyez sur ♠. Rétablissez la liaison au patient et vérifiez les paramètres thérapeutiques avec ❖.
- 5. Poursuivez la thérapie avec 👑.

Arrêter l'appareil

Suivez les étapes 1 à 2 du changement de seringue (sans placer de nouvelle seringue) et appuyez sur (b) pendant 3 secondes après avoir refermé le volet ainsi que l'étrier de seringue.

Infusomat® Space

Mini-guide

Mise en service et début de perfusion

- 1. Appuyez sur 🕛 pour mettre l'appareil en marche.
- 2. Pour commencer la mise en place de la tubulure, appuyez sur puis sur pour ouvrir la porte de la pompe.
- sur puis sur pour ouvrir la porte de la pompe.

 3. Placez la tubulure de droite à gauche et appuyer d'un doigt sur le détecteur d'air.
- 4. Fermez la cortecteur d'air.
- tubulure avec (ox).

 5. Si nécessaire, sélectionnez la base de données méd. avec
- ou sélectionnez/saisissez directement les paramètres thérapeutiques avec ou et démarrez ensuite avec ...

Modifier le débit

 Appuyez sur , entrez le nouveau débit avec et confirmez-le avec ox pour continuer avec le nouveau débit.

Changement de tubulure et nouveau démarrage de la thérapie

1. Appuyez sur 😁 pour arrêter la perfusion et interrompez la liaison au patient.

- Appuyez sur pour ouvrir la porte de la pompe avec puyer complètement sur le levier de déverrouillage vert [PRESS] jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retirez la tubulure et placez une nouvelle.
- 3. Fermez la porte de la pompe, confirmez la tubulure avec (0K) et ouvrez la pince à roulette.
- 5. Poursuivez la thérapie avec 🧠

Arrêter l'appareil

Suivez les étapes 1 à 3 du changement de tubulure (sans placer de nouvelle ligne) et appuyez sur opendant 3 secondes après avoir refermé la porte de la pompe.

